



Informace o výrobku

QUICK & CLEAN MAXI-UBROUSKY NÁHRADNÍ NÁPLŇ

BEZPEČNOST DANÁ KVALITOU

Dezinfekční prostředek připraven k použití pro inventář a plochy

- Neobsahuje aldehyd
- Neobsahuje fenol
- Vůně:
Fresh, lemon fresh



CE 0124

Typ preparátu

Dezinfekční prostředek UNIGLOVES ve spreji (na otírání) je vysoce výkonný preparát pro okamžité použití, který byl vyvinut podle nejnovějších technologií pro rychlou dezinfekci zdravotnických prostředků na bázi etanolu a QUATS v oblasti působnosti ve smyslu zákona o zdravotnických výrobcích.

Oblasti použití:

Dezinfekční prostředek UNIGLOVES ve spreji (na otírání) je vhodný pro všechny oblasti praxe a nemocnice:

- Všechny dentální lékařské oblasti
- Ošetrovny, operační stoly, lékařské vybavení atd.
- Dezinfekce malých zařízení

Aplikace:

Dezinfekční prostředek ve spreji (na otírání) UNIGLOVES se nastříká na dezinfikované plochy a předměty ze vzdálenosti 30 cm až do úplného smočení.

Nesmí se používat na plochy citlivé na alkohol, jako je např. plexisklo.

Není vhodný k předběžnému čištění nástrojů.

Mikrobiologie:

Dezinfekční prostředek ve spreji (na otírání) UNIGLOVES působí proti:

- Bakteriím (vč. Tb, MRSA a mycobacterium terrae)
- Houbám (candida albicans)
- Virům (HBV HIV a HCV poliovirus, adenovirus, lidské rota viry, chřipkové viry, MNV a Noro virus)

Mikrobiologická stabilita podle USP 30-NF, metoda <51>

Při použití s maxi ubrousky UNIGLOVES Quick & Clean a kbelíkem s rozprašovačem Unigloves Quick & Clean je preparát mikrobiologicky stabilní 28 dní.

Doba působení dle seznamu/certifikátu VAH:

5 minut

Baktericidní účinek/účinek proti kvasinkám/Tb:

Baktericidní: (vysoká zátěž) 30 sekund

MRSA, s. Aureus, E. hirae, P. aeruginosa, C. albicans, E. coli, P. mirabilis

Účinek proti kvasinkám: DIN EN 13684 (vysoká zátěž)

30 sekund

Acinetobacter baumannii DIN EN 13727:

30 sekund

Tbc: Mycobacterium terrae,

Mycobacterium avium DIN EN 14348 :

1 minuta

Virucidní:

BVDV (HIV/HBV/HCV) (Influenzavirus, H1N1/ H5N1, Herpes-, Corona-, SARS-CoV.):

30 sekund

Vakcinie kmen Elstree :

30 sekund

HBV-virucidní (HIV) bez zatížení

1 minuta

HBV-virucidní (HIV) vysoká zátěž

3 minuty

Adenovirus typu 5 DIN EN 14476 (nízká zátěž):

5 minut

Lidský rota virus DIN EN 14476 (nízká zátěž):

1 minuta

Poliovirus typu DIN EN 14476 (nízká zátěž):

5 minut

MNV Noro virus DIN EN 14476 (vysoká zátěž):

5 minut

Složení:

Ve 100,0 g roztoku je obsaženo:

33,66 g etanolu, 15,84 g 2-propanolu, 0,05 g dimethyldidecylammoniumchloridu, vonné látky, regulátor pH

Fyzikálně-chemické údaje:

Vzhled roztoku: Čirá kapalina

Hodnota pH cca 5,0

Hustota: (20°C) 0,91 ± 0,02

Značení podle směrnice ES/ nařízení o nebezpečných látkách:



Nebezpečí:

H228

Hořlavá tuhá látka.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí..

P101

Pokud je nutná lékařská pomoc, mějte připravený obal nebo štítek s označením.

P102

Nesmí se dostat do rukou dětem.

P103

Před použitím si přečtěte etiketu.

P210

Nenechávejte v blízkosti vysokých teplot/jisker/ otevřeného plamene/ /horkých povrchů. Nekuřte.

P280

Noste ochranné rukavice / ochranné brýle.

P260

Nevdechujte páry.. P305+P351+P338 PŘI

ZASAŽENÍ OČÍ:

Několik minut opatrně oplachujte vodou.

Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky.

Pokračujte ve vyplachování.