

Dezinfekce

Flächendesinfektion Plus

Informace o produktu

Vlastnosti

- Rychlá dezinfekce připravená k okamžitému použití s výrazně sníženým obsahem alkoholu
- Bez sporné složky „ethanol“, u které se plánuje přechod mezi karcinogenní látky
- Široké antimikrobiální spektrum účinku pro nejvyšší požadavky
- Bez kvartérních amoniových solí, nezanechává téměř žádné zbytky!

Oblast použití

- **Dle MPG (Zákon o zdravotnických prostředcích):** Rychlá alkoholová dezinfekce připravená k okamžitému použití pro profylaktickou dezinfekci povrchů neinvazivních zdravotnických prostředků odolných vůči alkoholu v lékařské oblasti.
- **Dle nařízení o biocidních přípravcích:** Rychlá alkoholová dezinfekce připravená k okamžitému použití pro dezinfekci malých ploch odolných vůči alkoholu.

Složení Sto gramů napouštěcí kapaliny obsahuje:

- 20,0 g 1-propanolu
- 5,0 g 2-propanolu

Chemicko-fyzikální údaje

- Hustota při 20 °C: 0,96 g/cm³

Pokyny k použití Při dezinfekci otřením navlhčete dezinfekčním roztokem vhodnou utěrku a povrch setřete, případně naneste roztok přímo na plochu a setřete. Při dezinfekci postřikem se přípravek nastříká na dezinfikovaný povrch a setře. Všechny ošetřované plochy musejí být zcela vlhké. Nechte přípravek působit podle uvedených dob působení. Používejte pouze na materiály odolné vůči alkoholu (nevhodné např. pro akrylátové sklo). Určeno k napouštění utěrek kompatibilních s roztokem, pouze pro profesionální uživatele.

Číslo produktů a formy dodání

- REF 97-001 Lemon Fresh | 1 litr
- REF 97-005 Lemon Fresh | 5 litrů
- REF 97-010 Lemon Fresh | 10 litrů
- REF 97-8001 Fresh | 1 litr
- REF 97-8005 Fresh | 5 litrů
- REF 97-8010 Fresh | 10 litrů
- REF 97-5001 Zelené jablko | 1 litr
- REF 97-5005 Zelené jablko | 5 litrů
- REF 97-1010 Zelené jablko | 10 litrů

Výrobce / Dodavatel UNIGLOVES GERMANY Arzt- & Klinikbedarf Handelsgesellschaft mbH Camp-Spich-Straße 71 D-53842 Troisdorf Tel: +49 (0) 2241-9323-0 E-mail: unigloves@unigloves.de Web: unigloves.de Člen OC HEALTHCARE GROUP

Vydání č. 2.0 | 14. 02. 2022 | Strana 1/3

Informace o produktu

Doba působení (Vztahuje se na napouštěcí kapalinu):

- **Bakterie** podle EN 13727, EN 1276, EN 13697, EN 16615 (vysoká zátěž): Koncentrovaný / 1 min.
- **Candida albicans** podle EN 13624, EN 1650, EN 13697, EN 16615 (vysoká zátěž): Koncentrovaný / 1 min.
- **Původci TBC (tuberkulózy)** (M. terrae) a **mykobakterie** (M. avium) podle EN 14348 (vysoká zátěž): Koncentrovaný / 1 min.
- **Obalené viry** (např. HBV, HIV, HCV) podle EN 14476 a EN 16777 (vysoká zátěž): Koncentrovaný / 1 min.
- **Noro-viry**: Koncentrovaný / 1 min (EN 14476, čisté podmínky) Koncentrovaný / 2 min (EN 16777, čisté podmínky)
- **Adeno-viry** (EN 14476, EN 16777, čisté podmínky): Koncentrovaný / 1 min.
- **Polyoma SV 40** (RKI/DVV se zátěží): Koncentrovaný / 1 min.
- **„Omezeně virucidní Plus“** (Noro-, Adeno- a Rota-viry): Koncentrovaný / 1 min (EN 14476, čisté podmínky) Koncentrovaný / 2 min (EN 16777, čisté podmínky)

Vydání č. 2.0 | 14. 02. 2022 | Strana 2/3

Flächendesinfektion Plus

Informace o produktu

Bezpečnostní pokyny

- **H226** Hořlavá kapalina a páry.
- **H319** Způsobuje vážné podráždění očí.
- **H336** Může způsobit ospalost nebo závratě.
- Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte ochranné brýle / obličejový štít.
- **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
- Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

Varování a upozornění

- **Varování** (Achtung)
- **Hořlavina!** Nestříkejte do otevřeného ohně!
- Bod vzplanutí podle DIN 51755: cca 30 °C.
- Aplikace max. 50 ml na m². Celkové aplikované množství na místnost nesmí překročit 100 ml na m² podlahové plochy.
- Skladovací teplota: 0 °C až 40 °C.