

Dezinfekce Flächendesinfektion AF

Informace o produktu

Vlastnosti

- Vynikající čisticí výkon (dodatečné použití čisticích aditiv není nutné)
- Nezanechává lepkavé zbytky
- Extrémně široké spektrum účinku při nízké aplikační koncentraci
- Vhodné i pro dávkovací zařízení
- Bez aldehydů a fenolů

Typ přípravku Dezinfekční koncentrát na bázi vody pro čištění a dezinfekci povrchů. Při nízkých aplikačních koncentracích pokrývá široké spektrum účinku proti bakteriím, kvasinkám a virům.

Oblast použití

- Jako biocidní přípravek: Koncentrát bez obsahu aldehydů pro dezinfekci a čištění ploch.
- Jako zdravotnický prostředek: Plošný dezinfekční prostředek pro profylaktickou dezinfekci povrchů zdravotnických prostředků. Nevhodné pro závěrečnou (terminální) dezinfekci invazivních zdravotnických prostředků.

Složení Ve 100 g je obsaženo:

- 10,8 g didecyldimethylamonium-chloridu
- 6,0 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diaminu

Chemicko-fyzikální údaje

- Hustota: 1,01 g/cm³
- Hodnota pH (při 20 °C): > 11

Číslo produktů a formy dodání

- REF 97-501 | 1 litr
- REF 97-505 | 5 litrů

Výrobce / Dodavatel UNIGLOVES GERMANY Arzt- & Klinikbedarf
Handelsgesellschaft mbH Camp-Spich-Straße 71 D-53842 Troisdorf Tel: +49 (0)
2241-9323-0 E-mail: unigloves@unigloves.de Web: unigloves.de

Informace o produktu

Použití Dezinfekční koncentrát se před použitím nejprve ředí vodou z vodovodu. Nemíchejte s čisticími prostředky ani jinými dezinfekčními přípravky! Před velkoplošnou aplikací na citlivé materiály (např. koženku) nejprve otestujte snášenlivost materiálu na malém skrytém místě. Aby se předešlo vzniku šmouh, měly by se ošetřené plochy v pravidelných intervalech otírat vlhkou jednorázovou utěrkou (vodou). Používejte výhradně jako dezinfekci otřením! Určeno pouze pro profesionální uživatele. Nepoužitý namíchaný roztok připravený k použití se musí denně měnit.

Doba působení

- **Bakterie a Candida albicans (EN 13727, EN 13697, EN 13624, VAH, EN 16615 s vysokou zátěží): 0,5 % – 15 min.**
- **Původci TBC (M. terrae) podle EN 14348: 2,0 % – 15 min (nízká zátěž) 0,5 % – 60 min (nízká zátěž) 1,0 % – 60 min (vysoká zátěž)**
- **„Omezeně virucidní“ (obalené viry dle RKI/DVV, např. HBV, HCV, HIV) s vysokou zátěží: 0,5 % – 15 min.**
- **Rota-viry (EN 14476, nízká zátěž): 0,5 % – 15 min.**

Flächendesinfektion AF

Informace o produktu

- **Noro-viry (EN 14476, vysoká zátěž): 1,5 % – 15 min. 1,0 % – 60 min.**
- **Adeno-viry (EN 14476, nízká zátěž): 2,0 % – 30 min.**
- **„Omezeně virucidní Plus“ (EN 14476, nízká zátěž): 2,0 % – 30 min.**
- **Polyoma SV 40-viry (EN 14476, vysoká zátěž): 1,0 % – 15 min.**

Doplňující údaje ke spektru účinku Baktericidní (vč. MRSA) dle EN 13727, EN 13697, EN 16615, VAH; levurocidní (Candida albicans) dle EN 13624, EN 13697, EN 16615, VAH; tuberkulocidní dle EN 14348; „omezeně virucidní Plus“ (obalené viry jako např. HBV, HIV, HCV) dle DVV/RKI a Noro-, Adeno- a Rota-viry dle EN 14476.

Dezinfekce Flächendesinfektion AF

Informace o produktu

Bezpečnostní pokyny

- **H302** Zdraví škodlivý při požití.
- **H314** Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
- **H410** Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
- Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
- **PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy):** Veškeré kontaminované oblečení okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
- **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte **TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO** nebo lékaře.
- Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

Obsahuje didecyldimethylamonium-chlorid, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin.

Piktogramy / Označení

- **Nebezpečí (Gefahr)**
- **Zdravotnický prostředek (MD)**
- **Skladovací teplota: 0 °C až 40 °C.**