

Technický list – český překlad

UNIGLOVES® Bohrerbad Plus – Produktová informace

Chemicko-fyzikální údaje

- Hustota: 1,01 g/cm³
- Hodnota pH: 9,8

Číslo artiklů a balení

- REF 97-601 – 2 litry
- REF 97-605 – 5 litrů

Dodavatel

UNIGLOVES® Arzt- & Klinikbedarf Handelsgesellschaft mbH

Camp-Spich-Straße 71, D-53842 Troisdorf, Německo

Tel.: +49 (0)2241-9323-0

E-mail: unigloves@unigloves.de

Vlastnosti

- Hotová, univerzálně použitelná roztoková forma pro snadnou přípravu vrtáků a rotačních nástrojů
- Díky mírné hodnotě pH zůstává ostrost břitů na řezných hranách výborně zachována
- Vysoká materiálová snášenlivost, příjemná vůně

Druh použití

Pro manuální čištění a profylaktickou dezinfekci vrtáků, fréz, diamantových brousků a dalších rotačních nástrojů.

Není vhodné pro terminální dezinfekci invazivních (semikritických a kritických) zdravotnických prostředků.

Pokyny pro použití

Bohrerbad Plus používejte vždy neředěný!

Nástroje po použití ihned vložit do připraveného roztoku tak, aby byly všechny části určené k dezinfekci zcela ponořeny.

Po uplynutí dezinfekční doby důkladně opláchněte nástroje, nejlépe demineralizovanou vodou, a osušte.

Nemíchat s jinými dezinfekčními nebo čisticími prostředky. Není vhodné pro hliník.

Podle míry znečištění je nutné roztok pravidelně měnit (doporučení RKI: minimálně 1× denně).

Roztok lze likvidovat přes odpadní vodu.

Doporučeno používat ochranné rukavice a ochranu očí.

Vhodné k použití v ultrazvukové lázni.

Doby působení

- Baktericidní (včetně MRSA) dle EN 13727, EN 14561, VAH, vysoká zátěž: 5 min
- Levurocidní (*Candida albicans*) dle EN 13624, EN 14562, VAH, vysoká zátěž: 5 min
- Mykobaktericidní (*M. terrae* a *M. avium*) dle EN 14348, EN 14563, nízká zátěž: 5 min
- „Begrenz viruzid“ (obalené viry, např. HBV, HIV, HCV) dle DVV/RKI a EN 17111, vysoká zátěž: 5 min

Dodatečné údaje o spektru účinku:

Baktericidní (vč. MRSA), levurocidní (*Candida albicans*), mykobaktericidní (*M. terrae*, *M. avium*), „begrenz viruzid“ (obalené viry – HBV, HIV, HCV).

Bezpečnostní pokyny

- H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobým účinkem.
- Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
- Likvidujte obsah/obal v souladu s platnými předpisy.

Teplotní rozsah skladování

0 °C až 40 °C

Vydání č. 2.2 – 04.01.2024