

Technický list – český překlad

UNIGLOVES® Flächendesinfektion Alkoholfrei – Produktová informace

Složení

Ve 100 g je obsaženo:

- 0,24 g benzyl-C12-16-alkyldimethylamonný chlorid
- 0,24 g N,N-didecyl-N,N-dimethylamonný chlorid
- 0,24 g C12-14-alkyl[(ethylfenyl)methyl]dimethylamonný chlorid

Chemicko-fyzikální údaje:

- Hustota: 1 g/cm³
- Hodnota pH: 7,2

Vlastnosti

- Vodný, hotově připravený roztok k dezinfekci i alkohol-citlivých materiálů
- Široké spektrum účinku
- pH-neutrální
- Registrace jako zdravotnický prostředek a biocid (dual use)

Přípravek

Vodný, hotově připravený roztok k čištění a dezinfekci alkohol-citlivých povrchů.

Účinné spektrum zahrnuje bakterie, kvasinky a viry.

Oblasti použití

Podle MPG:

Hotově připravená dezinfekce povrchů pro profylaktickou dezinfekci stíráním neinvazivních zdravotnických prostředků. Obzvláště vhodné pro použití na alkohol-citlivých plochách, např. akrylátové sklo.

Podle Biocidního nařízení:

Hotově připravená dezinfekce povrchů stíráním k dezinfekci ploch.

Obzvláště vhodné pro použití na alkohol-citlivých plochách, např. akrylátové sklo.

Aplikace

Hotový roztok se používá neředěný. Aplikujte ze vzdálenosti cca 20–30 cm jako pěnu (použijte vhodný pěnový nástavec) na dezinfikovanou plochu a rovnoměrně rozetřete nepouštějícím vláknem, nebarveným jednorázovým ubrouskem. Nechte působit. Dbejte na úplné smočení. Přebytkový přípravek případně odstraňte ubrouskem. Před plošným použitím na citlivých materiálech (např. koženka) otestujte na malé, skryté ploše. Aby se zabránilo vzniku šmouh, doporučuje se ošetřené plochy pravidelně setřít vlhkým (vodním) jednorázovým ubrouskem. Dezinfekční roztok smí být použit pouze k napouštění kompatibilních ubrousků dle EN 16615.

Doby působení a spektrum účinku

- Bakterie a Candida albicans podle EN 13727, EN 13624, EN 1276, EN 1650 (vysoká zátěž): 1 min
- Bakterie a Candida albicans podle EN 13697 (vysoká zátěž): 2 min
- Obalené viry (HBV, HIV, HCV) podle RKI/DVV (vysoká zátěž): 1 min
- Rota viry podle EN 14476 (nízká zátěž): 1 min
- Noro viry podle EN 14476 (nízká zátěž): 30 min
- Polyoma-SV40 viry (RKI/DVV se zátěží): 30 min

Dodatečné údaje o spektru účinku:

- Baktericidní (včetně MRSA) dle VAH, EN 13727, EN 13697, EN 1276, EN 16615
- Levurocidní (Candida albicans) dle VAH, EN 13624, EN 13697, EN 1650, EN 16615
- „Begrenz viruzid“ (účinné proti obaleným virům jako HBV, HIV, HCV)
- Účinné proti rota virům dle EN 14476
- Účinné proti noro virům dle EN 14476
- Účinné proti polyoma virům (SV 40) dle DVV/RKI

Teplotní rozsah skladování

0 °C až 40 °C

Dodavatel

UNIGLOVES® Arzt- & Klinikbedarf Handelsgesellschaft mbH

Camp-Spich-Straße 71, D-53842 Troisdorf, Německo

Tel.: +49 (0)2241-9323-0

E-mail: unigloves@unigloves.de

Vydání č. 7.1 – 22.01.2024