

Technický list – český překlad

UNIGLOVES® Abformdesinfektion PLUS – Produktová informace

Vlastnosti

- Účinný již během pouhých 5 minut! (dodatečná tuberkulocidní účinnost po 15 min)
- Neobsahuje aldehydy, alkoholy ani toxické složky – bezpečný při použití
- Příjemná vůně
- Registrace jako zdravotnický prostředek

Oblasti použití

Přípravek pro dezinfekci všech dentálních otiskovacích materiálů.

Aplikace

Otisk vložte do hotového dezinfekčního roztoku a po doporučené době působení opět vyjměte.

Otisk musí být zcela ponořen v roztoku. Algináty a hydrokoloidy pouze krátce ponořit a osušit.

Následně otisk opláchnout vodou. Nemíchat s čisticími prostředky nebo jinými dezinfekčními roztoky.

Podle míry znečištění je nutné roztok pravidelně měnit (doporučení RKI: minimálně jednou denně).

Pouze pro profesionální uživatele.

Chemicko-fyzikální údaje

- Hustota: 0,997 g/cm³
- Hodnota pH: 7,4

Doby působení

- Bakterie (včetně MRSA) dle VAH, EN 13727, EN 14561 (vysoká zátěž): 1 min
 - Candida albicans dle VAH, EN 13624, EN 14562 (vysoká zátěž): 1 min
 - „Begrenzt viruzid“ (obalené viry jako HBV, HIV, HCV) dle DVV/RKI a EN 17111 (nízká zátěž): 5 min
 - Mykobaktericidní (M. terrae v suspenzním testu, nízká zátěž): 15 min
-

Bezpečnostní pokyny

- H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobým účinkem
- Zabraňte uvolnění do životního prostředí
- Likvidujte obsah/obal v souladu s platnými předpisy

Teplotní rozsah skladování

0 °C až 40 °C

Číslo artiklů a balení

- REF 97-905 – 5 litrů
- REF 97-910 – 10 litrů

Dodavatel

UNIGLOVES® Arzt- & Klinikbedarf Handelsgesellschaft mbH

Camp-Spich-Straße 71, D-53842 Troisdorf, Německo

Tel.: +49 (0)2241-9323-0

E-mail: unigloves@unigloves.de

Vydání č. 5.0 – 25.10.2023