

Unigloves

Händedesinfektion (*Dezinfekce na ruce*)

Dezinfekční prostředek na bázi alkoholu

Charakteristika Biocid. Alkoholový dezinfekční prostředek připravený k okamžitému použití pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou. Určen k boji proti škodlivým organismům, dermatologicky testován.

Složení 100 g obsahuje: 62,8 g 2-propanolu

Číslo produktů a velikosti

- 97-250 | 250 ml
- 97-500 | 500 ml
- 97-101 | 1 000 ml
- 97-105 | 5 litrů

Výhody

- Rychle schne bez zanechání mastných/lepkavých zbytků
- K dispozici v neparfémovaných variantách
- Krátká doba působení
- Možnost certifikace VAH (hygienická dezinfekce rukou: 30 s, chirurgická dezinfekce rukou: 3 min)
- Možnost zařazení na seznam IHO (hygienická dezinfekce rukou: 30 s, chirurgická dezinfekce rukou: 90 s)
- Bez obsahu KAS (kvartérních amoniových solí)
- Obzvláště vhodný pro použití s rukavicemi
- Veganský
- Bez obsahu ethanolu

Pokyny k použití

- **Pro hygienickou dezinfekci rukou: Vpíchejte/vmasírujte 3 ml roztoku do rukou a udržujte je vlhké po dobu odpovídající níže uvedeným dobám působení.**
- **Pro chirurgickou dezinfekci rukou: Roztok vmasírujte do rukou a předloktí a udržujte je vlhké po dobu odpovídající níže uvedeným dobám působení, minimálně však 90 sekund.**
- **Pro chladivé obklady: Roztok se používá zředěný se stejným dílem vody.**

Účinnost a zkušební metody

Oblast / Účinek	Norma / Metoda	Zátěž	15 sek.	30 sek.	90 sek.
Všeobecné					
Hygienická dezinfekce rukou	EN 1500, VAH	vysoká		✓	
Chirurgická dezinfekce rukou	EN 12791, VAH	vysoká			✓
Bakterie					
TbB (<i>M. terrae</i>)	EN 14348	vysoká		✓	
Viry					
Obalené viry (např. HBV, HIV, HCV)	RKI/DVV a EN 14476	vysoká	✓		
Noro-viry	EN 14476	vysoká		✓	

Další upozornění

- Obal odevzdávejte k recyklaci pouze zcela vyprázdněný. Zbytky obsahu likvidujte pod kódem odpadu EAK 07 06 99.
- Tento produkt je určen pro profesionální použití. Další pokyny naleznete v bezpečnostním listu nebo na etiketě produktu.
- Dezinfekční prostředky používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu.
- Všechny závažné nežádoucí příhody, ke kterým došlo v souvislosti s produktem, musí uživatel/pacient nahlásit výrobci a příslušnému orgánu členského státu, v němž je uživatel/pacient usazen.

- **Všechny údaje vycházejí ze současného stavu našich znalostí a zkušeností a slouží čistě pro informační účely. Za uvedené údaje se nepřebírá žádná záruka ani garance. Údaje o vhodnosti a použití produktů nepředstavují závaznou dohodu o smluvní jakosti nebo specifické vhodnosti produktu k použití. Smluvní ujednání, zejména dohodnuté specifikace produktu, mají vždy přednost. Vyhrazujeme si právo změnit nebo aktualizovat informace o tomto produktu bez předchozího upozornění.**

Chemicko-fyzikální údaje

- **Hodnota pH: neutrální (7)**

Výrobce / Kontakty

- **UNIGLOVES GERMANY: Arzt- & Klinikbedarf Handelsgesellschaft mbH, Camp-Spich-Straße 71, D-53842 Troisdorf, Germany | Tel: +49 (0) 2241-9323-0 | unigloves@unigloves.de | de.unigloves.com**
- **UNIGLOVES UK: 3 Ambley Green, Gillingham Business Park, Gillingham, ME8 0NJ, UK | Tel: +44 (0) 800 049 6602 | enquiries@unigloves.co.uk | uk.unigloves.com**

Vydání č. 3.0 | 23. 06. 2026