

Technický list (CZ) – UNIGLOVES® Absauganlagendesinfektion PLUS

Vydání: 2.0 | Datum: 16/02/2022

Vlastnosti

- Bez aldehydů.
- Účinek na bázi kvartérních amonných sloučenin.
- Mimořádně nízkopěnová formulace.

Oblasti použití

K čištění a dezinfekci zubních sacích systémů (vč. slinných odsávaček), amalgámových separátorů a výplachových (oplachových) umyvadel.

Návod k použití

Koncentrát je nutné před použitím zředit vodou. Doporučená aplikační koncentrace: 2 %. Odměřte 20 ml koncentráту, doplňte pitnou vodou na 1 000 ml a tuto pracovní roztok nasajte přes sací hadici (slinný odsávač). Sací zařízení dle zatížení dezinfikujte 1–2× denně. Dezinfekce výplachového umyvadla: nalijte cca 250 ml připraveného roztoku. Nemíchejte s čistícími prostředky ani s jinými dezinfekčními přípravky! Pracovní roztoky vždy připravujte čerstvé a ihned použijte.

Chemicko-fyzikální údaje

pH (20 °C): 9

Hustota (20 °C): 1,0 g/cm³

Doby působení a spektrum účinku

Bakterie dle EN 13727 a EN 14561 (vysoké zatížení): 3,0 % – 2 min

Candida albicans dle EN 13624 a EN 14562 (vysoké zatížení): 3,0 % – 2 min

Obalené viry (např. HBV, HIV, HCV) dle RKI/DVV (s organickou zátěží): 2,0 % – 2 min

Bakterie a Candida albicans dle VAH při vysoké zátěži jako dezinfekce nástrojů: 2,0 % – 5 min; 1,0 % – 60 min

Bezpečnostní upozornění

NEBEZPEČÍ

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a vážné poškození očí.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Noste ochranné rukavice / ochranu očí.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování.

Při podráždění kůže/OČÍ: vyhledejte lékařské ošetření. Likvidujte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Obsahuje: N,N-dimethyl-N-dioctylamoniový chlorid, hydroxid draselný.

Skladování

Skladujte mezi 5 °C a 40 °C.

Balení / objednáací čísla

5 litrů — REF 97-4405

10 litrů — REF 97-4410

Dodavatel

UNIGLOVES® Arzt- & Klinikbedarf Handelsgesellschaft mbH
Camp-Spich-Straße 71, D-53842 Troisdorf
+49 (0) 2241-9323-0 • unigloves@unigloves.de • unigloves.de