

Technický list (CZ) – UNIGLOVES® Desinfektionstücher Plus-Classic (100 ks)

Issue No.: 2.0 | Datum: 16/02/2022

Popis výrobku

Připravené (ready-to-use), alkoholově redukované ubrousky pro rychlou dezinfekci povrchů s velmi dobrou materiálovou kompatibilitou; bez etanolu, se širokým antimikrobiálním spektrem díky booster-aditivům, bez kvartérních amonných solí, téměř bezezbytku zasychající. V EU použitelné jako biocid i jako zdravotnický prostředek (dual use). Netřepivé netkané vlákno; jednoduché použití v dávkovači bez reprocesingu; vhodné i pro malé členité plochy.

Složení (napouštěcí kapalina)

Ve 100 g napouštěcí kapaliny obsaženo:

- 20,0 g 1-propanolu
- 5,0 g 2-propanolu

Chemicko-fyzikální údaje

- Hustota: 0,95 g/cm³
- Bod vzplanutí (DIN 51755, alkoholové desinfekční prostředky): cca 29 °C

Oblasti použití

- Podle MDR/MPG (ZP): připravené alkoholové vlhčené ubrousky pro profylaktickou dezinfekci povrchů alkoholu-odolných neinvazivních zdravotnických prostředků.
- Podle nařízení o biocidech: připravené alkoholové vlhčené ubrousky pro dezinfekci malých alkoholu-odolných povrchů.

Návod k použití

- 1) Sejměte „Stick & Lift“ etiketu z náhradního sáčku a nalepte ji na dávkovací kbelík/dózu. Do pole запиšte datum otevření a datum použitelnosti.
- 2) Sáček nahoře otevřete a vložte do dávkovací nádoby.
- 3) První ubrousek vytáhněte a protáhněte hvězdicovým otvorem ve víčku.
- 4) Víko pevně přitlačte a nádobu těsně uzavřete.
- 5) Ošetřované plochy pečlivě otřete, rovnoměrně zvlhčete a nechte působit po předepsanou dobu.
- 6) Po každém použití nádobu opět těsně uzavřete.

- Doba použitelnosti po otevření: 28 dní.
- Používejte pouze na materiálův kompatibilních površích; před rozsáhlejším použitím na citlivých materiálech (např. speciální laky, koženka) nejprve otestujte na malé skryté ploše.
- Reprocesing dávkovacího kbelíku/dózy provádějte podle pokynů k reprocesingu vhodným dezinfekčním ubrouskem.
- Specifická bezpečnost pro alkoholové dezinfekční prostředky: max. aplikované množství 50 ml/m²; celkové aplikované množství v místnosti max. 100 ml na m² podlahové plochy. Nádoby udržujte těsně uzavřené.

Spektrum účinku a doby působení (vztahuje se k napouštěcí kapalině)

- Bakterie (EN 13727, EN 1276, EN 13697), vysoká zátěž: 1 min
- Candida albicans (EN 13624, EN 1650, EN 13697), vysoká zátěž: 1 min
- Mykobakteria/TbB – M. terrae, M. avium (EN 14348), vysoká zátěž: 1 min
- Obalené viry (např. HBV, HIV, HCV) – EN 14476 a EN 16777, vysoká zátěž: 1 min
- Norovirus: 1 min (EN 14476, čisté podmínky); 2 min (EN 16777, čisté)
- Adenovirus: 1 min (EN 14476; EN 16777, čisté)
- Polyomavirus SV40 (RKI/DVV, s organickou zátěží): 1 min
- Begrenzt viruzid PLUS (Noro-/Adeno-/Rota-viry) dle EN 14476 a EN 16777: 1 min (čisté)
- Classic ubrousky – 100 listů: Bakterie a Candida albicans dle EN 16615 (vysoká zátěž): 5 min

Bezpečnost

NEBEZPEČÍ / VAROVÁNÍ

H228 Hořlavá tuhá látka. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P280 Používejte ochranu očí/obličeje.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou.

P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Balení a objednáací čísla

- 100 listů / dóza – REF 9780-100 (Neutral), REF 9782-100 (Lemon)
- 100 listů / náhradní sáček – REF 9781-100 (Neutral), REF 9783-100 (Lemon)

Dodavatel

UNIGLOVES® Arzt- & Klinikbedarf Handelsgesellschaft mbH

Camp-Spich-Straße 71, D-53842 Troisdorf

+49 (0) 2241-9323-0 • unigloves@unigloves.de • unigloves.de