

Technický list (CZ) – UNIGLOVES® Wet Wipes Plus (80 ks)

Issue No.: 2.0 | Datum: 24/02/2022

Vlastnosti / Popis výrobku

K okamžitému použití, silně alkoholově redukované ubrousky pro rychlou dezinfekci povrchů s velmi dobrou materiálovou kompatibilitou; bez diskutované složky „ethanol“ (u níž je zvažováno přecházení jako karcinogenní); široké antimikrobiální spektrum pro nejvyšší nároky díky inovativním booster-aditivům; bez kvartérních amonných solí; téměř bezezbytku zasychající. Registrováno v EU jako biocid i jako zdravotnický prostředek (dual use). Netřepivé vliesové materiály; různé praktické velikosti ubrousků s vysokou vydatností (velmi dobrá vydávací schopnost vliesu).

Složení (napouštěcí kapalina)

Ve 100 g napouštěcí kapaliny obsaženo:

- 20,0 g 1-propanolu
- 5,0 g 2-propanolu

Fyzikální údaje

Hustota: 0,95 g/cm³

Oblasti použití

Podle MDR/MPG (zdravotnický prostředek): připravené alkoholové vlhčené ubrousky pro profylaktickou dezinfekci povrchů alkoholu-odolných, neinvazivních zdravotnických prostředků.

Podle nařízení o biocidech: připravené alkoholové vlhčené ubrousky pro dezinfekci malých alkoholu-odolných povrchů.

Návod k použití

Sejměte „Stick & Lift“ etiketu z náhradního sáčku a nalepte ji na dávkovací kbelík/dózu. Na vyznačené pole uveďte datum otevření a datum použitelnosti. Sáček nahoře otevřete a vložte do dávkovací nádoby. První ubrousek vytáhněte a protáhněte hvězdicovým otvorem ve víčku. Víko pevně přitlačte a nádobu těsně uzavřete (u flowpacku se netýká). Ošetřované plochy pečlivě otřete, rovnoměrně zvlhčete a nechte působit. Po použití nádobu vždy těsně uzavřete. Ubrousky jsou po otevření použitelné 28 dní. Používejte pouze na materiálově kompatibilních materiálech. Před rozsáhlejší aplikací na citlivých materiálech (např. speciální laky, koženka) nejprve otestujte na malé skryté ploše. Reprocessing dávkovacího kbelíku/dózy provádějte dle pokynů k reprocesingu vhodným dezinfekčním ubrouskem.

Doby působení / Spektrum účinku (vztahuje se k napuštěným ubrouskům)

Bakterie a Candida albicans dle EN 16615, vysoká zátěž: 1 min

Bezpečnostní upozornění

NEBEZPEČÍ / VAROVÁNÍ

H228 Hořlavá tuhá látka. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P280 Používejte ochranu očí/obličeje.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou.

P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Specifická bezpečnost pro alkoholové dezinfekční prostředky:

- Bod vzplanutí dle DIN 51755: cca 29 °C
- Max. aplikované množství: 50 ml/m²
- Celkové aplikované množství v místnosti: max. 100 ml na m² podlahové plochy
- Nádobu udržujte těsně uzavřenou.

Skladování

Skladujte mezi 0 °C a 40 °C.

Balení / objednáací čísla

80 listů – REF 97-2022

Dodavatel

UNIGLOVES® Arzt- & Klinikbedarf Handelsgesellschaft mbH

Camp-Spich-Straße 71, D-53842 Troisdorf

+49 (0) 2241-9323-0 • unigloves@unigloves.de • unigloves.de