

Urinální sáček – měřič moči

Návod k použití

POPIS

Měřič moči je určen pro odvádění moči u pacientů během operace. **Sběrný vak** slouží ke shromažďování moči, zatímco **měřič** zajišťuje přesné měření objemu moči pacienta v určitém časovém období.

Tento výrobek je určen pro pacienty, u nichž je nutné **přesné měření objemu moči**.

INDIKACE / ÚČEL POUŽITÍ

Měřič moči slouží k **přesnému měření množství vyloučené moči**. Obvykle se používá u pacientů v kritickém stavu nebo během chirurgických zákroků.

KONTRAINDIKACE

Nejsou známy žádné kontraindikace.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nebyly hlášeny žádné vedlejší účinky.

FUNKCE A VLASTNOSTI

- **Velká stupnice a dobře čitelné číslice** pro snadné a přesné odečítání
- **Vzduchový ventil** zajišťuje stálé proudění vzduchu a snižuje riziko infekce močových cest
- **Měřicí přesnost: ± 1 ml**
- Měkká, proti zalomení odolná hadička pro volný průtok moči
- Univerzální kuželový konektor se vzorkovacím portem
- **Bezjehlový vzorkovací port** pro bezpečný odběr moči bez kontaminace
- Pohodlný ventil na spodní části vaku, který lze zajistit proti kontaktu s podlahou

Modely: **2500 ml, 3100 ml**

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Zavěste vak pomocí háčku nebo provázku na postranici lůžka.
2. Hadičku upevněte pomocí klipu k prostěradlu, aby zůstala rovně mezi lůžkem a sběrným vakem.
3. Odstraňte ochranný kryt z konektoru a připojte drenážní hadičku ke katétru.
4. Při odběru vzorku:

- Sevřete hadičku asi 7–8 cm pod vzorkovacím portem, dokud se moč neobjeví.
- Dezinfikujte port antiseptickým tampónem.
- Pomocí aseptické techniky zasuňte stříkačku (luer-lock nebo slip tip) pod úhlem 80–100°.
- Odeberte potřebné množství moči a poté uvolněte hadičku.

5. Při vyprazdňování vaku:

- Uvolněte výpustní trubici z pouzdra a otevřete ventil.
- Po vyprázdnění opět uzavřete ventil a zajistěte jej.

VAROVÁNÍ A OPATŘENÍ

- **Pouze pro jednorázové použití!**
- Nepoužívejte, pokud je obal poškozen nebo byl otevřen.
- Nepoužívejte po datu expirace.
- Nepoužívejte, pokud je výrobek poškozený nebo deformovaný.
- Nepřetavujte ani neresterilizujte – může dojít k porušení funkce, riziku infekce nebo k ohrožení života pacienta.
- Zařízení smí používat pouze odborně vyškolený personál.
- Pokud vak není správně umístěn, moč může obejít měřič a téct přímo do sběrného vaku. V takovém případě je nutné vak přemístit.
- Při pozorování volného proudění moči pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k zalomení hadičky nebo k ucpaní.
- Výrobek obsahuje **DEHP (di(2-ethylhexyl)ftalát)**, látku klasifikovanou jako karcinogen skupiny 2B (IARC). DEHP může způsobit reprodukční a vývojovou toxicitu. Riziko je nízké, ale **děti, těhotné a kojící ženy** by měly používat výrobek s opatrností.

SYMBOLY NA OBALU

- Nepoužívejte znovu
- Sterilizováno ethylenoxidem
- Chraňte před vlhkostí, sluncem a tlakem
- Teplotní limity: **–15 °C až +49 °C**
- Jednorázový sterilní obal

- Datum výroby, číslo šarže, datum použitelnosti
- Konzultujte návod k použití
- Pokud je obal poškozen, nepoužívejte

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém, chladném a tmavém místě.

Chraňte před vlhkostí, nadměrným teplem a dlouhodobým vystavením UV a zářivkovému světlu.

Zabraňte mechanickému poškození a deformaci.

VÝROBCE

Well Lead Medical Co., Ltd.

C-4 Jinhu Industrial Estate, Hualong, 511434 Panyu, Guangzhou, ČÍNA

E-mail: info@welllead.com.cn | Tel: +86 20 84758878

Web: www.welllead.com.cn

Evropský zástupce:

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburk, NĚMECKO

Verze a datum: **WLIFU-01-059-01A / 29. dubna 2021**